



INFORMATIONSBLATT QUANTIFERON TB plus TEST

Allgemeines

- Die Einsendung der Proben kann Montag - Donnerstag erfolgen, sofern auf die angegebenen Tage kein Feiertag folgt.
- Die Voraussetzung für die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen ist: die Angabe "**Einstellung auf Biologica**" oder "**Biologica-Therapie**". Wird keine Diagnose auf dem Überweisungsschein angegeben, wird die Untersuchung, je nach Auswahl, mit dem/der zuweisenden Arzt/Ärztin oder dem/der Patienten/Patientin verrechnet. Die Preise entnehmen Sie bitte dem Anforderungsprogramm.
- Das Kürzel, unter dem der Test in unseren Anforderungsprogrammen zu finden ist, lautet: **QF-TB**.

Probenmaterial

- Bitte verwenden Sie unsere speziellen Quantiferon Abnehmeröhrchen. Ein Set (pro PatientIn) besteht aus je 1 Röhrchen mit **grünem, grauem, lila und gelbem** Verschluss.
- Artikelnummern: **0103000-0103003**, Materialnummer: **HEP16, HEP17, HEP18, HEP19**

ACHTUNG: Pro PatientIn müssen **alle 4 Röhrchen verwendet** werden. Blut bitte erst **kurz vor Probenabholung** abnehmen!

- Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Röhrchen mit **lila** Verschlusskappe um **KEIN** herkömmliches **Blutbild- oder Blutgruppenröhrchen** handelt. Sollten Sie ein solches versehentlich einsenden, kann der gesamte Quantiferon Test **NICHT** ausgewertet werden, die Kosten dafür müssen jedoch in Rechnung gestellt werden.
- Um die benötigte Menge an Probenmaterial für den Quantiferon Test zur Verfügung zu haben, **empfehlen wir dringend**, vor der Abnahme des 1. Quantiferon-Röhrchens ein anderes Probenröhrchen abzunehmen, um Luft aus dem Abnahmesystem zu entfernen (z.B.: Luft im Schlauch bei Probenentnahme mit Butterfly) Quantiferon-Röhrchen dürfen **NIEMALS** unterfüllt sein!
- Röhrchen, unmittelbar nach dem Befüllen, zehn Mal **gut kippen** (nicht schütteln!), sodass die Innenwand der Röhrchen ganz mit Blut bedeckt ist. Erst dadurch können sich die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen. Bitte den Zeitpunkt der Blutabnahme auf dem Begleitschein vermerken. Die abgenommenen Proben sind bei **Raumtemperatur zu lagern** und sollten innerhalb von 16 Stunden im Labor eingelangt sein.





INFORMATIONSBLATT QUANTIFERON TB plus TEST

- Bitte geben Sie die abgenommenen Röhrchen in die dafür vorgesehene Probentransportbox für Quantiferon Tests.
- **Die Probentransportbox für Quantiferon Tests bitte ausschließlich für Quantiferon Röhrchen verwenden!**
- Pro PatientIn bitte einen Probenbegleitschein beilegen (dieser wird von uns zur Verfügung gestellt bzw. kann dieser aus dem Anforderungsprogramm mit Überweisung ausgedruckt werden).
- Bitte beachten Sie, dass wir die Spezialblutröhrchen nicht lagernd haben. Die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche ab Bestellung.
- Die Probentransportbox, Artikelnummer: **0103006** bitte bei unserem Medizinproduktepartner **Meditec +43 2742 258 958**, nach jedem Transport ins Labor, bestellen!
- Wir ersuchen Sie, diese Punkte bei der Einbestellung Ihrer PatientInnen zu berücksichtigen.

Lagerung und Transport der befüllten Röhrchen

- bei Raumtemperatur (15-25° C), keinesfalls gekühlt
- aufrecht stehend

Nur durch Einhaltung der Abnahme- und Transportbestimmungen kann ein korrektes Analyseergebnis gewährleistet werden.

Vielen Dank!

